

# MÓDULOS HIGIÉNICOS

# MODULOS HIGIÉNICOS ET

---

La seguridad es nuestro principal objetivo. Por ello todos los Módulos Higiénicos ET tienen una membrana de seguridad que evita la contaminación y fuga de fluidos hacia el dermatógrafo, eliminando así el riesgo de infección.



Nuestras agujas están constantemente bajo inspección y exceden los estándares de seguridad. Además, son precisas y estables sin pérdida de la condición, incluso después de varias horas de uso. Minimizando el trauma para el cliente y el tiempo de curación.

Las agujas están hechas de acero inoxidable de grado quirúrgico para evitar la exposición al níquel, evitando reacciones alérgicas y toxicidad.

Euro-Touch® dispone del primer sistema patentado en el que las agujas están integradas en cartuchos desechables de un solo uso.

Las agujas están esterilizadas con óxido de etileno. Cada aguja recibe un número de lote individual para su trazabilidad. Su estructura proporciona perforaciones altamente precisas y limpias, con lo que conseguimos menor inflamación que conlleva a una mayor fijación del pigmento.

## MÓDULO HIGIÉNICO ET

|      | Módulo Higiénico | Dermógrafo              | Diámetro      | Velocidad de Trabajo                   | Descripción  |
|------|------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| ○    | Nano 1           | Symphony y Modul        | 0,08 a 0,20mm | 90-110                                 | Precisa, cejas pelo a pelo. Pielés secas y sensibles.  |
| ○    | Nano 2           | Symphony -Modul-PRO     | 0,10 a 0,25mm | 100-120                                | Cejas pelo a pelo. Pielés normales o grasas.   |
| ⦿    | Nano NT          | Modul- PRO              | 0,10 a 0,25mm | 100-120                                | Alta precisión debido a su guía metálica. Cejas pelo a pelo  |
| ●    | 1p Micro         | Symphony - Modul-PRO    | 0,18 a 0,40mm | 100-120                                | Cejas pelo a pelo y capilar  |
| ●    | 1p Liner         | Symphony - Modul-PRO    | 0,25 a 0,40mm | 100-110                                | Trazados muy finos y precisos, rectificación de pequeños errores   |
| ●●●  | 3p Outline       | Symphony - Modul* - PRO | 0,25mm        | 110-130                                | Contorno de labios fino, eyeliner fino, relleno de pestañas, cejas compactas.  |
| ●●●  | 3p Micro         | Modul-PRO               | 0,18mm        | 110-130                                | Cejas pelo a pelo, contornos de labios finos , eyeliner fino y trazados finos  |
| ●●●  | 3p Liner         | Symphony - Modul-PRO    | 0,30mm        | 110-130                                | Contorno de labios, eyeliner, relleno de pestañas, cejas compactas.  |
| ●●●  | 3p Power *       | Modul                   | 0,30mm        | 120-130                                | Eyeliner, relleno de pestañas, delineado y relleno de labios, areolas y estrias. Pielés normales o grasas.   |
| !!!  | 3p Slope         | Symphony y Modul        | 0,40mm        | 110-130                                | Llamadas bailarinas por la posibilidad de trabajar con 1 o 3 puntas (según posición del dermógrafo) espectaculares cejas pelo a pelo.                          |
| !!!  | 3p Nano Slope    | Modul-PRO               | 0,25mm        | Delineado 100-130<br>Sombreado 100-120 | Llamadas bailarinas por la posibilidad de trabajar con 1 o 3 puntas (según posición del dermógrafo).Cejas pelo a pelo, contorno de labios y sombreados         |
| ●●●  | 3p Nano Spread   | PRO                     | 0,25mm        | 100-130                                | Técnicas de sombreado en general especialmente en los labios.  |
| ●●●● | 4p Flat *        | Symphony - Modul        | 0,35mm        | 100-130                                | Espectaculares resultados pelo a pelo: poner las agujas del modulo en posición paralela al dibujo del pelo que quiere obtener, relleno de mucosa, difuminados. |

*\*Hasta fin de existencias*

## MÓDULO HIGIÉNICO ET

|  | Módulo Higiénico | Dermógrafo            | Diámetro | Velocidad de Trabajo                   | Descripción   |
|--|------------------|-----------------------|----------|--|---|
|  | 5p Shader        | Symphony -Modul-PRO   | 0,30mm   | 120-140                                | Grandes trazados, rellenos, contorno de labios.   |
|  | 5p Round*        | Modul                 | 0,30mm   | 120-140                                | Grandes trazados, rellenos, contorno de labios.   |
|  | 5p Power*        | Modul                 | 0,30mm   | 120-130                                | Sombreados en general.  |
|  | 5p Magnum*       | Symphony - Modul      | 0,30mm   | 120-140                                | Eyeliner, tattoos, rellenos.  |
|  | 5p Slope         | Symphony* - Modul     | 0,40mm   | 120-140                                | Llamadas bailarinas por la posibilidad de trabajar con 1 o 5 puntas (según posición del dermógrafo) difuminados perfectos.        |
|  | 5p Nano Slope    | Modul-PRO             | 0,25mm   | Delineado 100-130<br>Sombreado 100-120 | Superficies a sombreadar más grandes, como en labios completos, micropigmentación de areola y tatuajes de cuerpo pequeño.         |
|  | 5p Nano Spread   | PRO                   | 0,25mm   | 100-130                                | Técnicas de sombreado en general en todas las áreas, especialmente para labios, areola, cicatrices.                               |
|  | 7p Nano Spread   | PRO                   | 0,25mm   | 100-130                                | Sombreados en general, labios, areola y cicatrices.   |
|  | 7p Nano Round    | PRO                   | 0,25mm   | Máxima Velocidad                       | Técnicas de sombreado en general en todas las áreas, especialmente labios.  |
|  | 7p Round*        | Symphony y Modul      | 0,30mm   | Máxima Velocidad                       | Las siete agujas forman un círculo perfecto lo que permite trazados anchos en labios, apenas sin necesidad de saturar el trazado. |
|  | 7p Power*        | Modul                 | 0,30mm   | 120-130                                | Sombreados en general.  |
|  | 9p Magnum        | Symphony* - Modul-PRO | 0,30mm   | Máxima Velocidad                       | Se recomiendan para rellenos de grandes zonas, senos, reconstrucción de areolas, calvas y demás trabajos medicales                |

*\*Hasta fin de existencias*